

GripLock Finger™

Instruções de utilização
Dispositivo protético de classe 1
PPF101 | Primeira geração



Fabricante



Naked Prosthetics
408 Olympia Ave NE
Olympia, WA 98501
USA
+1 (360) 915-9724
Fabricado nos EUA

Representante autorizado



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

PORTUGUÊS



Dispositivo médico

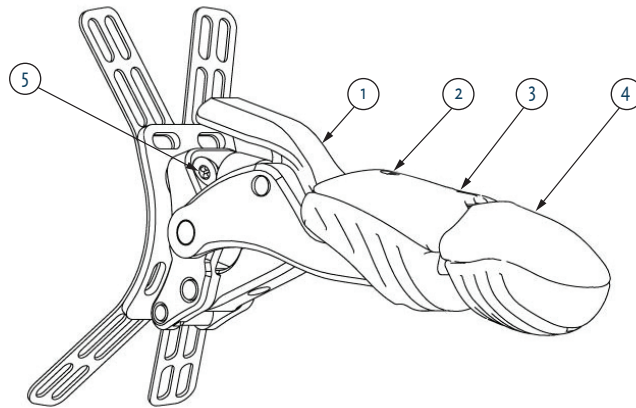


Figura: A

LISTA DE PEÇAS

Figura A:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| ① Linguete (alavanca de libertação) | ② Parafuso de fixação da capa | ③ Capa P2 |
| ④ Ponta GLF | ⑤ Parafusos de fixação da ancoragem | |

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **GripLock Finger** é uma prótese mecânica, passiva, bloqueável destinada a restaurar a função da mão no caso de pacientes com anomalias congénitas ou amputações totais de dedos. O **GripLock Finger** substitui os dedos amputados, permitindo aos utilizadores recuperar a preensão e padrões de aperto funcionais. Para além de restaurar a oposição de força e o comprimento dos dedos afetados, também ajuda a proteger o local da amputação e a resistir a forças dolorosas no final do dedo residual.

O **GripLock Finger** funciona como um dedo mecânico, bloqueável e posicionável. Após a flexão, existem duas formas de voltar à posição neutra: (1) ao premir o linguete localizado no lado dorsal (*Figura A, 1*) do **GripLock Finger** ou (2) ao fletir totalmente o **GripLock Finger** até alcançar a posição de reposição, o que possibilita a libertação. Os **GripLock Fingers** destinam-se a ser utilizados em conjunto com um encaixe fabricado à medida, sendo aplicados nos pacientes por um médico certificado.

Recomendações de utilização

Recomenda-se uma utilização gradual do **GripLock Finger**, até à passagem a tempo inteiro. Isto permite evitar ferimentos musculares decorrentes do excesso de utilização, visto que os músculos poderão encontrar-se num estado de subutilização.

Após receber o seu dispositivo, recomendamos que efetue terapia à mão, ocupacional ou de reabilitação para o fortalecimento muscular e funcionamento ideal do dispositivo.

Aviso

- No caso de pacientes com sensibilidade, recomenda-se a utilização do **GripLock Finger** conforme tolerado.
- Caso surja vermelhidão ou irritação cutânea, reduza a utilização do dispositivo.
- Se a vermelhidão persistir ou caso sofra desconforto, interrompa imediatamente a utilização do dispositivo e contacte o seu médico.


Quaisquer incidentes graves deverão ser comunicados à Naked Prosthetics e às autoridades governamentais responsáveis no local onde o utilizador e/ou paciente se encontre.

Manutenção do dispositivo

- O GripLock Finger é à prova de água, resistente a poeiras, a produtos químicos e ao calor e foi concebido para utilização.
- A exposição prolongada a solventes fortes poderá danificar as superfícies pintadas.
- A utilização frequente de desengordurantes poderá remover a lubrificação das dobradiças.
- Contacte o seu médico com vista à manutenção ou substituição de componentes.
- Para garantir a longevidade do GripLock Finger, aplique um óleo mineral leve de qualidade alimentar nos seguintes locais:

Figura B:

- ① Mola
- ② Interface do linguete
- ③ Dobradiça do linguete
- ④ Dentes

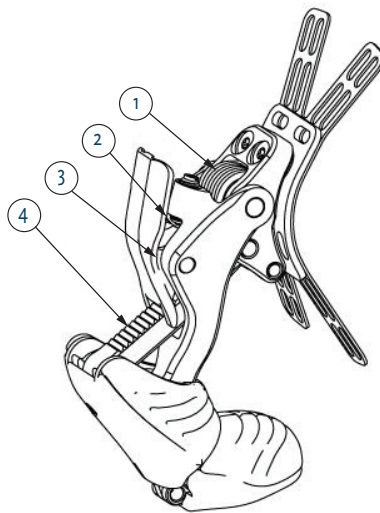

* NOTA: por questões de segurança, as dobradiças apenas devem ser desmontadas pelo fabricante do dispositivo.

Cuidados e limpeza

- A exposição prolongada a solventes fortes poderá danificar as superfícies pintadas e remover a lubrificação das dobradiças.
- Enxaguar com água doce após utilização em água salgada.
- Limpar o dispositivo com água morna e detergente suave conforme necessário. Secar com um pano ou deixar secar naturalmente.
- Limpar a sujidade ou resíduos do dispositivo com uma escova de dentes velha ou ar, se desejado.
- NÃO colocar na máquina de lavar; NÃO colocar na máquina de secar.

Garantia

A Naked Prosthetics oferece uma garantia padrão de 1 ano (a partir da data de envio) ao nível da função mecânica do GripLock Finger. Contacte a Naked Prosthetics para consultar opções adicionais de garantia alargada.

Alteração do desempenho

Em caso de alteração no desempenho de um dispositivo, interrompa sempre a utilização do mesmo e contacte a sua clínica.



Aviso: não utilizar o dispositivo caso o contacto entre o dispositivo e a pele do paciente cause dor, abrasão excessiva ou sangramento.

Comunicação de incidente grave

Quaisquer incidentes graves relacionados com o dispositivo devem ser comunicados ao fabricante e às autoridades relevantes.

Eliminação

O dispositivo e os materiais de embalagem devem ser eliminados em conformidade com os regulamentos ambientais locais ou nacionais em vigor.

Responsabilidade

A Naked Prosthetics não assume qualquer responsabilidade nos seguintes casos:

- Manutenção do dispositivo não efetuada conforme indicado nas instruções de utilização.
- Dispositivo montado com componentes de outros fabricantes.
- Dispositivo utilizado fora da condição, aplicação ou ambiente recomendados.

Para obter mais informações: aceda a npdevices.com