

MCPDriver™

Gebruiksaanwijzing
Lichaamsbekrachtigd synthetisch
hulpmiddel van klasse 1
BPF 202 | Tweede generatie



Fabrikant



Naked Prosthetics
408 Olympia Ave NE
Olympia, WA 98501
USA
+1 (360) 915-9724
Geproduceerd in de VS

Bevoegde vertegenwoordiger





EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

NEDERLANDS



Medisch Hulpmiddel

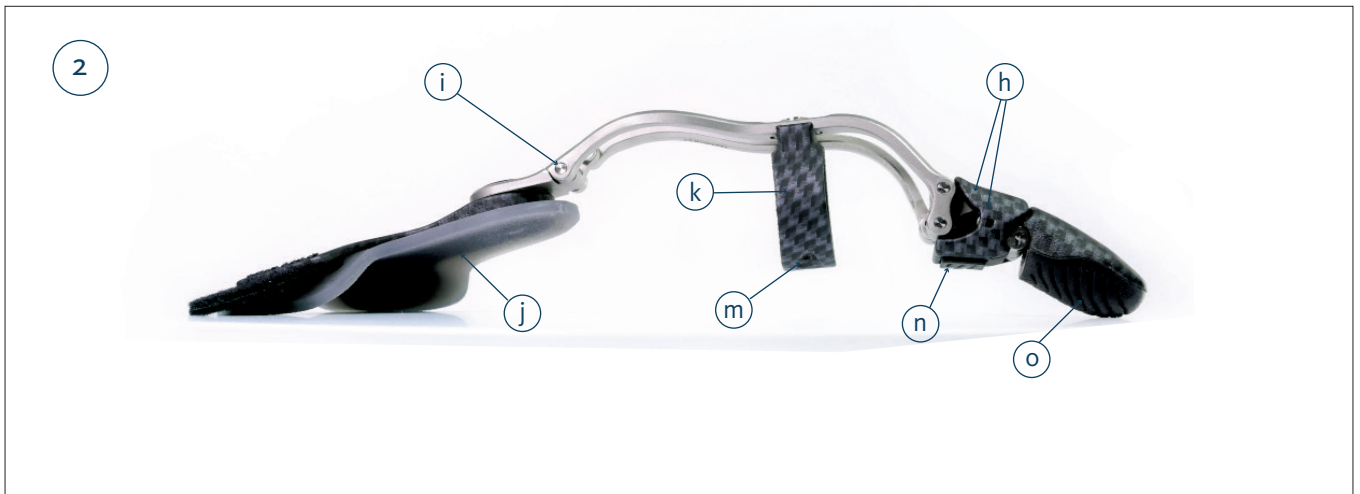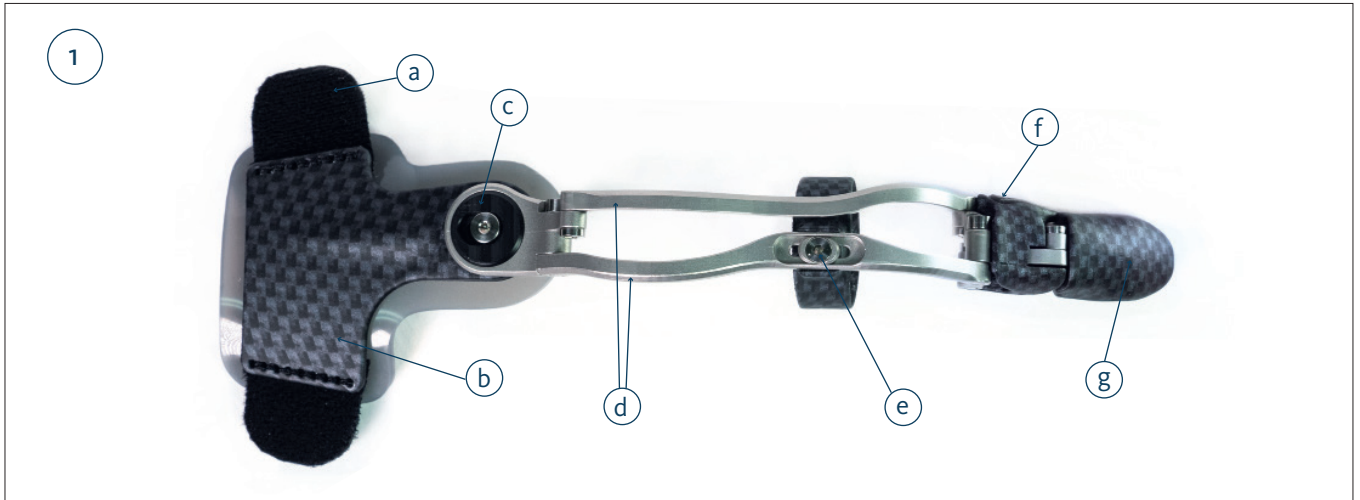

ONDERDELENLIJST

- | | |
|---|----------------------------------|
| a. Bevestigingsbandjes | h. P2-kuip |
| b. Aangepaste achterplaat | i. Scharnierverbinding |
| c. Sluitring voor abductie/adductie | j. Dorsale siliconeninterface |
| d. Aangepaste metalen stangen | k. Ophangingsring |
| e. Schroef voor het afstellen van de ring | m. Gat voor vulplaatje voor ring |
| f. P2 Lateraal kussen | n. Siliconenkussen |
| g. Tip van hulpmiddel | o. Siliconen vingertop |

PRODUCTBESCHRIJVING

MCPDriver is een lichaamsbekrachtigde mechanische protese die als doel heeft de handfunctie te herstellen bij patiënten met een gedeeltelijke vingeramputatie. Naast het herstellen van de beweeglijkheid, kracht en lengte van de betrofene vinger volgt het hulpmiddel ook de natuurlijke abductie van de vinger, helpt het de amputatieplek te beschermen, en voorkomt het hyperextensie in de vinger. De MCPDriver gebruikt de resterende vingersterkte en beweeglijkheid om de twee kunstmatige distale kootjes te laten bewegen zodat de vinger terug functioneel wordt.

Toepassing van het hulpmiddel

1. Open het bandje van de MCP-achterplaat en plaats het hulpmiddel op de betrokken hand en vinger.
 - Plaats de scharnierverbinding (*item i*) recht boven of iets achter het MCP-gewricht (*knokkel*).
 - De ring voor abductie/adductie (*item c*) moet 12,7 mm – 1,90 mm ($\frac{1}{2}$ " – $\frac{3}{4}$ ") achter (d.w.z. dichterbij de pols) het midden van het anatomische MCP-gewricht zitten.
2. Breng de aangebrachte ophangingsring (*item k*) aan op de vingerstomp en controleer de eerste passing.
 - De ophangingsring moet losjes zitten, zodat de ring tijdens het buigen en strekken langs de stomp kan schuiven.
 - Kortere stompen hebben meer baat bij een nauwsluitende pasvorm of een siliconen vulplaatje voor een beter bewegingsbereik.
 - OPMERKING: *de ophangingsring mag nooit knellen rond de stomp.*
3. Maak het bandje vast aan de basis van de hand.
 - Het moet strakker rond de vingers zitten dan een horlogebandje om de pols.

* OPMERKING: *Als u merkt dat uw stomp of vinger wat dikker of dunner is, kunt u vulplaatjes toevoegen of verwijderen of de ringmaat naar wens aanpassen.*

Aanbevelingen voor gebruik

- We raden aan om het gebruik van de MCPDriver geleidelijk aan op te bouwen. Dit voorkomt overbelasting en letsels bij spieren die voorheen minder werden gebruikt.
- Nadat u de prothese hebt ontvangen, wordt fysiotherapie, revalidatie of handtherapie aanbevolen om de spieren te versterken voor een optimale werking van de prothese.

Let op

- Patiënten met gevoeligheden gebruiken de MCPDriver zolang deze wordt verdragen
- Gebruik de prothese minder als de huid rood is.
- Als de huid rood blijft en het ongemak aanhoudt, stop dan onmiddellijk het gebruik van de prothese en neem contact op met uw orthopedisch technicus.

***BELANGRIJKE OPMERKING:** *metalen delen mogen nooit in contact komen met de huid. Het hulpmiddel mag ook niet op het uiteinde van uw ledemaat drukken. Stop in dat geval onmiddellijk met het gebruik van het hulpmiddel en neem contact op met uw orthopedische technicus.*

Ernstige incidenten moeten worden gemeld aan Naked Prosthetics en de bevoegde overheidsinstanties van het land waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Onderhoud van het hulpmiddel

- De MCPDriver is water-, vuil- en hittebestendig en bestand tegen chemicaliën.
- Regelmatig werken met ontvettingsmiddelen kan de smering van de scharnieren verwijderen. Breng zo nodig een voedselveilige lichte minerale olie aan op de scharnieren.
- Neem voor onderhoud of het vervangen van onderdelen contact op met uw orthopedische technicus.

* OPMERKING: *om veiligheidsredenen mogen scharnieren alleen door de fabrikant van het hulpmiddel worden gedemonteerd.*

Onderhoud en reiniging

- Langdurige blootstelling aan oplosmiddelen kan gelakte oppervlakken beschadigen en de scharniersmering verwijderen.
- Na gebruik in zout water spoelen met zoet water.
- Maak het hulpmiddel indien nodig schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Droog deppen of aan de lucht laten drogen.
- Verwijder vuil van het hulpmiddel met een oude tandenborstel of perslucht, indien gewenst.
- **NIET wassen in de wasmachine; NIET drogen in de droogtrommel.**

* **OPMERKING:** *bandjes absorberen water en drogen langer dan de rest van het hulpmiddel of systeem.*

Accessoires van het hulpmiddel (meegeleverd)

Naast de MCPDriver is het volgende meegeleverd om de pasvorm van het hulpmiddel te optimaliseren:

- Extra polsband
- Ophangingsring met een maat groter dan de oorspronkelijke maat
- Ophangingsring met een maat kleiner dan de oorspronkelijke maat
- Klein vulplaatje – KV
- Medium vulplaatje – MV
- Groot vulplaatje – GV
- Een (1) inbussleutel van 1,58 mm (1/16")

Garantie

Naked Prosthetics biedt een standaard garantie van 1 jaar (vanaf de verzenddatum) op de mechanische functie van de MCPDriver.

Neem contact op met Naked Prosthetics voor extra garantieopties.

Melding van ernstig incident

Alle ernstige incidenten in verband met het hulpmiddel moeten worden gemeld aan de fabrikant en de relevante autoriteiten.

Wegwerpen

Het hulpmiddel en de verpakking moeten worden weggegooid conform de desbetreffende lokale of nationale milieuwetgeving.

Aansprakelijkheid

Naked Prosthetics is niet aansprakelijk indien:

- het hulpmiddel niet werd onderhouden volgens de gebruiksinstructies
- het hulpmiddel aangepast is met onderdelen van andere fabrikanten.
- het hulpmiddel buiten de aanbevolen gebruiksomstandigheden, -toepassing of -omgeving is gebruikt.

Ga voor meer informatie naar npdevices.com