

MCPDriver™

Bruksanvisning
Kroppsdreven klass 1-protes
BPF 202 | Andra generationen



Tillverkare



Naked Prosthetics
408 Olympia Ave NE
Olympia, WA 98501
USA
+1 (360) 915-9724
Tillverkad i USA

Auktoriserad representant





EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

SVENSKA



Medicinteknisk
produkt

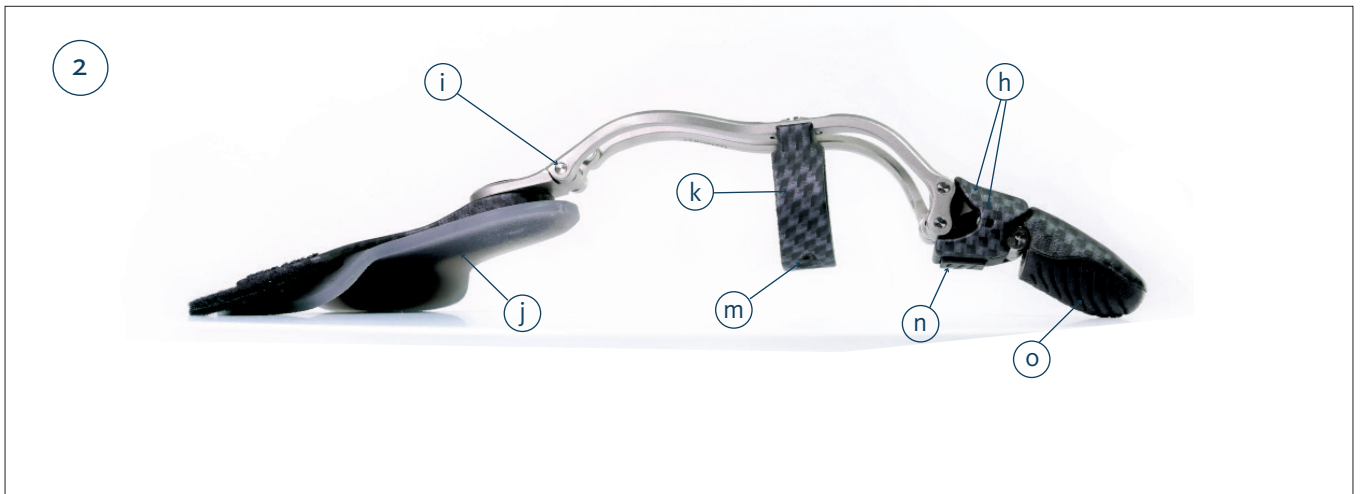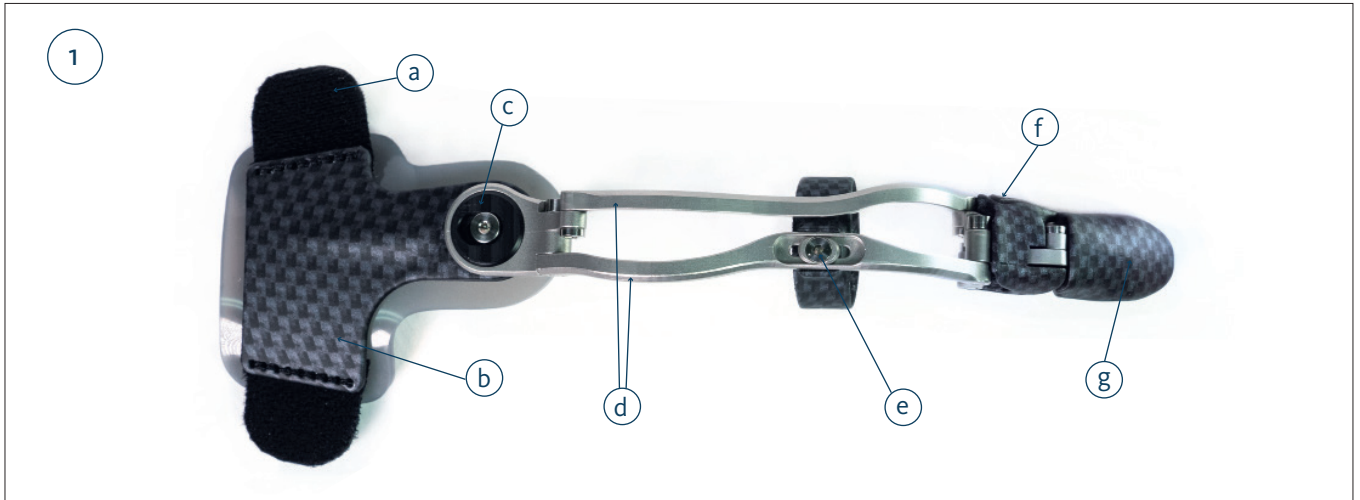

FÖRTECKNING ÖVER DELAR

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| a. Remfästen | h. P2-hölje |
| b. Måttillverkad bakplatta | i. Gångjärnsled |
| c. Abduktions-/adduktionsbricka | j. Dorsal silikonkontaktyta |
| d. Måttillverkade metallbyglar | k. Fingerring |
| e. Justeringskruv för ring | m. Ringhål för mellanlägg |
| f. P2 lateral dyna | n. Silikondyna |
| g. Protestopp | n. Silikontopp |

PRODUKTBESKRIVNING

MCPDriver är en kroppsdriven mekanisk protes som syftar till att återställa handfunktionen hos patienter med partiella fingeramputationer. Utöver att återställa fingerfärdighet, styrka och längd hos det drabbade fingret följer den också fingrets naturliga abduktion, hjälper till att skydda amputationsstället och motverkar hyperextension av fingret. MCPDriver använder sig av användarens styrka och rörelser i det återstående fingret för att artikulera två artificiella distala falanger för att återställa ett funktionellt finger.

Applicering av protesen

- Öppna remmen för MCP-bakplattan och placera protesen på den drabbade handen och fingret.
 - Sätt gångjärnsleden (*artikel i*) direkt i linje ovanför eller en aning bakom MCP-leden (*knogen*).
 - Abduktions-/adduktionsbrickan (*artikel c*) ska vara 12,7 mm – 1,90 mm ($\frac{1}{2}$ " – $\frac{3}{4}$ ") bakom (d.v.s. närmare handleden) den anatomiska MCP-ledens centrum.
- Placera den monterade fingerringen (*artikel k*) på det återstående fingret och kontrollera hur den sitter initialt.
 - Fingerringen ska sitta löst, vilket låter ringen glida längs det återstående fingret under böjning och utsträckning.
 - För kortare återstående fingrar kan en mer åtsittande fingerring eller ett silikonmellanlägg underlätta upptagande av hela rörelseomfånget.
 - NOTERA: *Fingerringen ska aldrig "strypa" det återstående fingret.*
- Fäst remmen runt handens bas.
 - Remmen ska sitta närmare fingrarna än vad ett klockarmband skulle sitta.

* NOTERA: *Om du upplever periodiska volymförändringar kan du lägga till eller ta bort mellanlägg eller ändra på din ringstorlek enligt behov.*

Användningsrekommendationer

- Vid användning av MCPDriver rekommenderar vi att du successivt ökar användningen av protesen och inte börjar med att använda den på heltid. Detta hjälper till att förhindra överansträngningsskador i muskler som eventuellt har varit underanvända.
- Arbeterapi, rehabilitering eller handterapi rekommenderas efter att du har fått din protes för att stärka musklerna och få protesen att fungera optimalt.

Varning

- För patienter med hudkänslighet rekommenderar vi användning av MCPDriver i den mån som deras hud tål det.
- Minska användningen av protesen om huden börjar rodna.
- Sluta använda protesen genast och kontakta din ortopedingenjör om rodnaden håller i sig eller om det börjar kännas obehagligt.

***VIKTIGT ATT NOTERA:** *Ingen del av metallen får någonsin klämma mot huden och protesen får aldrig kollidera med änden av din extremitet vid något tillfälle – sluta genast använda protesen och kontakta din ortopedingenjör om något av detta inträffar.*

Allvarliga tillbud ska rapporteras till Naked Prosthetics och lämpliga statliga myndigheter där användaren och/eller patienten är baserad.

Underhåll av protesen

- MCPDriver är vattentät, smuts-, kemikalie- och värmeresistent och byggd för att användas.
- Regelbundet arbete med avfettningsmedel kan försämra smörjningen av gångjärnslederna. Applicera vid behov en livsmedelsgodkänd tunn mineralolja på ställen med gångjärnsleder.
- Kontakta din ortopedingenjör för service eller utbyte av komponenter.

* NOTERA: *Av säkerhetsskäl ska gångjärnslederna endast tas isär av protestillverkaren.*

Skötsel och rengöring

- Långvarig kontakt med starka lösningsmedel kan skada målade ytor och försämra smörjningen hos gångjärnslederna.
- Skölj med sötvatten efter användning i saltvatten.
- Rengör protesen med varmt vatten och mildt rengöringsmedel enligt behov. Torka den varsamt eller låt den lufttorka.
- Rengör och ta bort smuts eller orenheter på protesen med en gammal tandborste eller tryckluft.
- **Maskintvätta INTE protesen och lägg den INTE i en torktumlare.**

* **NOTERA:** Remkomponenter absorberar vatten och tar längre tid att torka än resten av protesen eller systemet.

Protестillbehör (ingår)

Utöver MCPDriver ingår följande artiklar som hjälper till att optimera protesens passform:

- Extra handledsrem
- Fingerring i större storlek än den initiala
- Fingerring i mindre storlek än den initiala
- Litet mellanlägg – LM
- Medium mellanlägg – MM
- Stort mellanlägg – SM
- En (1) 1,58 mm (1/16") insexnyckel

Garanti

Naked Prosthetics ger en 1-årig standardgaranti (från leveransdatumet) på den mekaniska funktionen hos MCPDriver. Kontakta Naked Prosthetics Devices för ytterligare förlängda garantialternativ.

Rapportering av allvarliga tillbud

Alla allvarliga tillbud avseende enheten ska rapporteras till tillverkaren och relevanta myndigheter.

Kassering

Enheten och förpackningen ska kasseras i enlighet med lokala eller nationella miljöbestämmelser.

Ansvarsskyldighet

Naked Prosthetics tar inte ansvar för följande:

- Enheten har inte underhållits enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- Enheten har monterats med komponenter från andra tillverkare.
- Rekommendationer för användningsförhållanden, tillämpning eller omgivning för enheten har inte efterlevts.

För mer information: besök npdevices.com