

PIPDriver™

Gebruiksaanwijzing
Lichaamsbekrachtigd synthetisch
hulpmiddel van klasse 1
BPF 201 | Tweede generatie



Fabrikant



Naked Prosthetics
408 Olympia Ave NE
Olympia, WA 98501
USA
+1 (360) 915-9724
Geproduceerd in de VS

Bevoegde vertegenwoordiger





EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

NEDERLANDS



Medisch Hulpmiddel

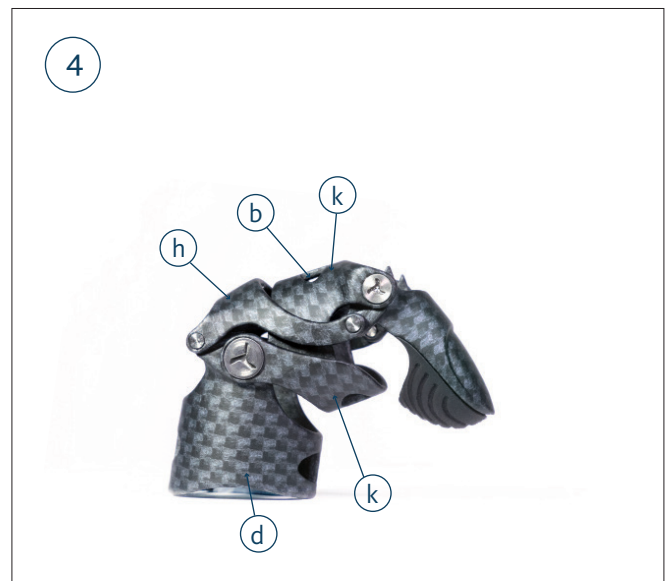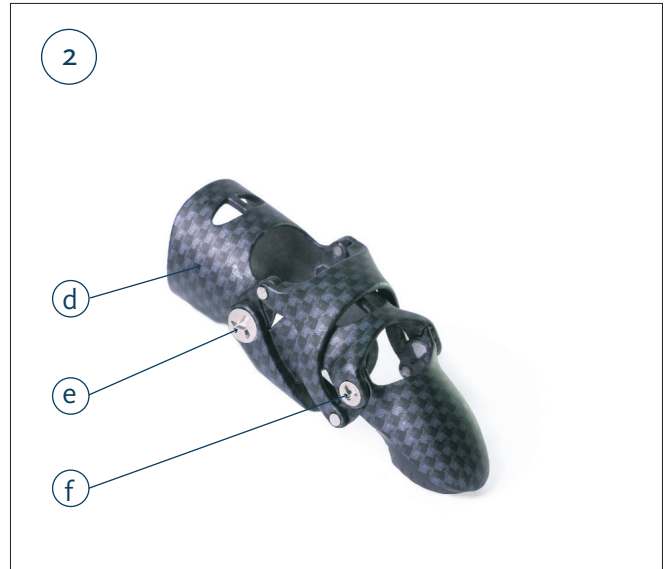

ONDERDELENLIJST

- a. Nagelstijl (Organic afgebeeld)
- b. Gat voor vulplaatje van dorsale kooi
- c. Gat voor vulplaatje van dorsale ring
- d. Ring
- e. Grote bevestiging
- f. Kleine bevestiging
- g. Siliconen vingertop
- h. Pees
- i. Gat voor vulplaatje van palmaire kooi
- j. Gat voor vulplaatje van palmaire ring
- k. Kooi (dorsaal en palmair)

PRODUCTBESCHRIJVING

De PIPDriver is een lichaamsbekerachtigde mechanise prothese die als doel heeft de handfunctie te herstellen bij patiënten met gedeeltelijke vingeramputaties. Elk hulpmiddel is aangepast aan de grootte, de lengte en het bewegingsbereik van een specifieke patiënt. Naast het herstellen van de beweeglijkheid, kracht en lengte van de betrokken vinger helpt het de amputatieplek te beschermen, en voorkomt het hyperextensie in de vinger. De PIPDriver™ gebruikt de resterende vingersterkte en beweeglijkheid om een kunstmatig distaal kootje te laten bewegen en de vinger opnieuw functioneel te maken.

Toepassing van het hulpmiddel

1. Plaats het hulpmiddel op de betrokken vinger. De sticker aan de binnenkant van de ring helpt om te weten welke vinger waar moet komen.
2. Plaats de grote bevestiging (*item e*) op of iets achter het PIP-gewricht (*middelste knokkel*) van de vinger
3. Controleer de eerste pasvorm
 - De ring (*item d*) moet zo strak zitten als een trouwring
 - Beweeg uw hand ondersteboven voorzichtig heen en weer om ervoor te zorgen dat het hulpmiddel op de vinger blijft zitten
 - Als het hulpmiddel los zit, breng dan een combinatie van siliconen vulplaatjes aan op de vier plekken (*items b, c, i en j*)
 - Als er speling is rond de stomp, voeg dan vulplaatjes toe
4. Beweeg het hulpmiddel meerdere malen en controleer op correct buigen en strekken
 - Als het hulpmiddel niet volledig strekt, plaatst u een groter vulplaatje in de locatie voor het vulplaatje van de dorsale kooi (*item b*)

* **OPMERKING:** *als u merkt dat uw stomp of vinger wat dikker of dunner is, kunt u vulplaatjes toevoegen of verwijderen.*

Aanbevelingen voor gebruik

- We raden aan om het gebruik van de PIPDriver geleidelijk aan op te bouwen. Dit voorkomt overbelasting en letsels bij spieren die voorheen minder werden gebruikt.
- Nadat u de prothese hebt ontvangen, wordt fysiotherapie, revalidatie of handtherapie aanbevolen om de spieren te versterken voor een optimale werking van de prothese.

Let op

- Patiënten met gevoeligheden gebruiken de PIPDriver zolang deze wordt verdragen.
- Gebruik de prothese minder als de huid rood is.
- Als de huid rood blijft en het ongemak aanhoudt, stop dan onmiddellijk het gebruik van de prothese en neem contact op met uw orthopedisch technicus.

Ernstige incidenten moeten worden gemeld aan Naked Prosthetics en de bevoegde overheidsinstanties van het land waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Onderhoud van het hulpmiddel

- De PIPDriver is ontworpen voor minimaal onderhoud en minimale zorg.
- De PIPDriver hoeft niet te worden gesmeerd.
- De PIPDriver is water-, vuil- en hittebestendig en bestand tegen chemicaliën.
- Neem contact op met uw orthopedisch technicus voor onderhoud of voor extra siliconen vulringen.

* **OPMERKING:** om veiligheidsredenen mogen scharnieren alleen door de fabrikant van het hulpmiddel worden gedemonteerd.

Onderhoud en reiniging

- Langdurige blootstelling aan sterke oplosmiddelen kan gelakte oppervlakken beschadigen.
- Na gebruik in zout water spoelen met zoet water.
- Maak het hulpmiddel indien nodig schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Droog deppen of aan de lucht laten drogen.
- Verwijder vuil van het hulpmiddel met een oude tandenborstel of perslucht, indien gewenst.
- **NIET wassen in de wasmachine; NIET drogen in de droogtrommel.**

Accessoires van het hulpmiddel (meegeleverd)

Naast de PIPDriver is een volledige set vulplaatjes meegeleverd om de pasvorm van het hulpmiddel te optimaliseren:

- Klein vulplaatje – KV
- Medium vulplaatje – MV
- Groot vulplaatje – GV

Garantie

Naked Prosthetics biedt een standaard garantie van 1 jaar (vanaf de verzenddatum) op de mechanische functie van de PIPDriver. Neem contact op met Naked Prosthetics Devices voor extra garantieopties.

Melding van ernstig incident

Alle ernstige incidenten in verband met het hulpmiddel moeten worden gemeld aan de fabrikant en de relevante autoriteiten.

Wegwerpen

Het hulpmiddel en de verpakking moeten worden weggeworpen conform de desbetreffende lokale of nationale milieuwetgeving.

Aansprakelijkheid

Naked Prosthetics is niet aansprakelijk indien:

- het hulpmiddel niet werd onderhouden volgens de gebruiksinstructies
- het hulpmiddel aangepast is met onderdelen van andere fabrikanten.
- het hulpmiddel buiten de aanbevolen gebruiksomstandigheden, -toepassing of -omgeving is gebruikt.

Ga voor meer informatie naar npdevices.com