

PIPDriver™

Bruksanvisning
Kroppsdreven klass 1-protes
BPF 201 | Andra generationen



Tillverkare



Naked Prosthetics
408 Olympia Ave NE
Olympia, WA 98501
USA
+1 (360) 915-9724
Tillverkad i USA

Auktoriserad representant



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

SVENSKA



Medicinteknisk
produkt



FÖRTECKNING ÖVER DELAR

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a. Nagelstil (Organic visas) | g. Silikontopp |
| b. Dorsalt hylshål för mellanlägg | h. Sena |
| c. Dorsalt ringhål för mellanlägg | i. Palmart hylshål för mellanlägg |
| d. Ring | j. Palmart ringhål för mellanlägg |
| e. Stor ledskruv | k. Hylsa (dorsal och palmar) |
| f. Liten ledskruv | |

PRODUKTBESKRIVNING

PIPDriver är en kroppsdriven mekanisk protes som syftar till att återställa handfunktionen hos patienter med partiella fingeramputationer. Varje protes anpassas till en specifik patients storlek, längd och rörelseomfång. Utöver att återställa fingerfärdighet, styrka och längd hos det amputerade fingret hjälper den också till att skydda amputationsstället och motverkar hyperextension av fingret. PIPDriver™ använder sig av användarens styrka och rörelser i det återstående fingret för att artikulera en artificiell distal falang för att återställa ett funktionellt finger.

Applicering av protesen

1. Placera protesen på det drabbade fingret. Ett klistermärke som identifierar fingret klistras fast på insidan av ringen för enkel identifiering.
2. Sätt den stora ledskruven (*artikel e*) i linje med eller en aning bakom PIP-leden (*mittknogen*) på fingret
3. Kontrollera den initiala passformen
 - Ringen (*artikel d*) ska passa lika tätt som en vigselring
 - Skaka varsamt på handen upp-och-ner för att försäkra dig om att protesen hålls på fingret
 - Om protesen är lös, montera en kombination av silikonmellanlägg på de fyra platserna (*artikel b, c, i och j*)
 - Lägg till mellanlägg enligt behov om det finns mellanrum runt den återstående delen av fingret
4. Artikulera protesen flera gånger och kontrollera att böjning och utsträckning fungerar korrekt
 - Om protesen inte extenderar helt, öka då storleken på mellanlägget i den dorsala hylsan (*artikel b*)

* **NOTERA:** Om du upplever periodiska volymförändringar kan du lägga till eller ta bort mellanlägg på valfria platser enligt behov.

Användningsrekommendationer

- Vid användning av PIPDriver rekommenderar vi att du successivt ökar användningen av protesen och inte börjar med att använda den på heltid. Detta hjälper till att förhindra överansträngningsskador i muskler som eventuellt har varit underanvända.
- Arbetsterapi, rehabilitering eller handterapi rekommenderas efter att du har fått din protes för att stärka musklerna och få protesen att fungera optimalt.

Varning

- För patienter med hudkänslighet rekommenderar vi användning av PIPDriver i den mån som deras hud tål det.
- Minska användningen av protesen om huden börjar rodna
- Sluta använda protesen genast och kontakta din ortopedingenjör om rodnaden håller i sig eller vid obehag

Allvarliga tillbud ska rapporteras till Naked Prosthetics och lämpliga statliga myndigheter där användaren och/eller patienten är baserad.

Underhåll av protesen

- PIPDriver är designad för minimalt underhåll och skötsel.
- PIPDriver kräver inte smörjning.
- PIPDriver är vattentät, smuts-, kemikalie- och värmeresistent och byggd för att användas.
- Kontakta din ortopedingenjör för service eller för att få ytterligare silikonmellanlägg.

* **NOTERA:** Av säkerhetsskäl ska gångjärnslederna endast tas isär av protestillverkaren.

Skötsel och rengöring

- Långvarig kontakt med starka lösningsmedel kan skada målade ytor.
- Skölj med sötvatten efter användning i saltvatten.
- Rengör protesen med varmt vatten och mildt rengöringsmedel enligt behov. Torka den varsamt eller låt den lufttorka.
- Rengör och ta bort smuts eller orenheter på protesen med en gammal tandborste eller tryckluft.
- **Maskintvätta INTE protesen och lägg den INTE i en torktumlare.**

Protestillbehör (ingår)

Utöver PIPDriver ingår ett fullständigt set med mellanlägg som hjälper till att optimera protesens passform:

- Litet mellanlägg – LM
- Medium mellanlägg – MM
- Stort mellanlägg – SM

Garanti

Naked Prosthetics ger en 1-årig standardgaranti (från leveransdatumet) på den mekaniska funktionen hos PIPDriver.

Kontakta Naked Prosthetics Devices för ytterligare förlängda garantialternativ.

Rapportering av allvarliga tillbud

Alla allvarliga tillbud avseende enheten ska rapporteras till tillverkaren och relevanta myndigheter.

Kassering

Enheten och förpackningen ska kasseras i enlighet med lokala eller nationella miljöbestämmelser.

Ansvarsskyldighet

Naked Prosthetics tar inte ansvar för följande:

- Enheten har inte underhållits enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- Enheten har monterats med komponenter från andra tillverkare.
- Rekommendationer för användningsförhållanden, tillämpning eller omgivning för enheten har inte efterlevts.

För mer information: besök npdevices.com